

# Conveen : Conjunto EasiCath



**Para uma cateterização intermitente em qualquer momento e lugar**

- Sistema integrado único com ampola de água
- Fácil manuseamento
- Aplicação estéril



**Coloplast**

# Conveen : Conjunto EasiCath

para uma maior independência



O conjunto **EasiCath** é um sistema integrado que inclui tudo o que é necessário para uma suave cateterização: Catéter, saco colector e solução de água salina esterilizada. Com estes 3 produtos num só, o utilizador dispõe de tudo o que precisa para uma cateterização em qualquer lugar e momento.

## Catéter EasiCath Conveen

O catéter **EasiCath** de utilização única está provido de um revestimento hidrofílico na parte externa e interna e de orifícios que asseguram uma passagem suave na uretra. O catéter é feito em cloreto de polivinilo (PVC) e lubrificado com polivinilpirrolidona (PVP).

## Saco Colector

A concepção e flexibilidade do saco colector permite uma fácil ligação do catéter ao saco. O saco dispõe de indicação do volume, pega e dispositivo de esvaziamento. É feito em polipropileno e existe em tamanhos de 700 ml e 1.200 ml.

## Solução Salina Estéril

A ampola contém 0,9% de solução de cloreto de sódio (30 ml para homens e 15 ml para senhoras e crianças) garantindo uma óptima qualidade de água independentemente do local onde o utilizador se encontra. A ampola é feita de polietileno.

## Esvaziamento da bexiga em qualquer momento e lugar

O conjunto **EasiCath** possibilita o esvaziamento da bexiga de uma forma segura e discreta em situações em que o acesso à casa de banho é complicado ou não é de todo possível.

### ● Fora de casa

A cateterização é facilitada no emprego, em viagem, em actividades desportivas ou simplesmente quando o utilizador está fora de casa. O utilizador não terá que procurar uma casa de banho para esvaziar a sua bexiga. Devido à ampola integrada com água evitam-se problemas com águas poluídas.

### ● De noite

Muitas pessoas consideram um esforço adicional o facto de se terem de cateterizar durante a noite. Agora é possível efectuar esta operação sem saírem da cama.


### ● No hospital

O conjunto **EasiCath** é esterilizado e o revestimento permite ao utilizador a possibilidade de inserir o catéter sem o tocar. O risco de infecção é reduzido e o pessoal hospitalar evita o contacto directo com a urina.



## Um Sistema Completo

A gama **Conveen** inclui também dispositivos urinários (*Penrose*) e sacos para urina. Juntamente com os catéteres **EasiCath** esta gama disponibiliza um sistema completo de dispositivos de alta qualidade para pessoas com problemas de esvaziamento de bexiga.

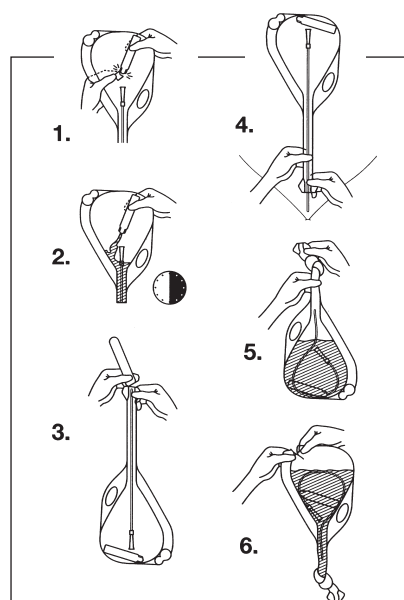

## Instruções para utilização

1. Partir do topo da ampola de água.
2. Deixar o catéter em água, pelo menos 30 segundos.
3. Voltar o saco com a abertura para cima e abri-lo cortando o topo.
4. Iniciar a cateterização.
5. Inserir novamente o catéter no saco e apertar com um nó.
6. Esvaziar o saco antes de o deitar fora. (Não deitar o saco na sanita).



## Gama de Produtos

Tamanho CH	Nº de Cód.		Nº de Cód.
	Int. Masculino	Int. Feminino	Int. Pedi
700 ml	06		28011
	08	28005	28001
	10	28006	28002
	12	28007	28003
	14	28008	28004
	16	28009	28014
18	28010		
1.200 ml	08	28025	
	10	28026	
	12	28027	
	14	25028	
	16	25029	
	18	28030	



Coloplast A/S  
Rua Gorgel do Amaral nº 4 - cv Dta.  
1250-119 Lisboa  
Telef.: +351 21 38 38 626  
Fax: +351 21 38 38 628  
www.export.coloplast.com

## Importador e Distribuidor:

**MUNDINTER Intercâmbio Mundial de Comércio, S.A.**  
(Consultas e Concursos)  
Av. António Augusto Aguiar 138  
1069-132 Lisboa  
Telef.: 213 81 99 00 (15 Linhas)  
Fax.: 213 87 35 70  
Lojas: Lisboa - Telef.: 213 81 99 80  
Porto - Telef.: 225 50 48 62/3  
Coimbra - Telef.: 239 82 82 56  
www.mundinter.pt