

Conveen : Saco de urina de 1500 ml



- Para doentes acamados e/ou com necessidade de maior capacidade
- Tubo suave e anti-bloqueio
- Válvula de segurança anti-refluxo
- Válvula de abertura de fácil manuseamento
- Indicação do volume



Coloplast

Conveen : Saco de urina de 1500 ml

Facilita os cuidados com os doentes acamados



Perfeito para qualquer situação que requeira maior capacidade, por exemplo durante a noite. Reduz o número de drenagens (e incómodos) quando o fluxo de urina é considerável. O saco é fornecido com tubo de 90 cm, que pode ser cortado para o tamanho necessário. Está também disponível um suporte sólido de plástico para manter o saco distendido em todo o seu comprimento, a fim de não se abater sob o peso da urina. O suporte pode ser utilizado em camas e cadeiras de rodas.



Tubo suave e anti-bloqueio

O tubo é fabricado em material leve e flexível que pode ser dobrado e torcido sem bloquear o fluxo da urina. É suave e confortável e não irrita a pele.


Válvula de segurança anti-refluxo

A válvula é concebida para impedir o refluxo da urina, mesmo quando o saco está em posição invertida.



Válvula de abertura de fácil manuseamento

A válvula pode ser aberta e fechada com uma mão, mesmo que esta disponha de pouca força. É fácil de ver se a válvula está fechada ou aberta e um clique indica quando esta está devidamente fechada.

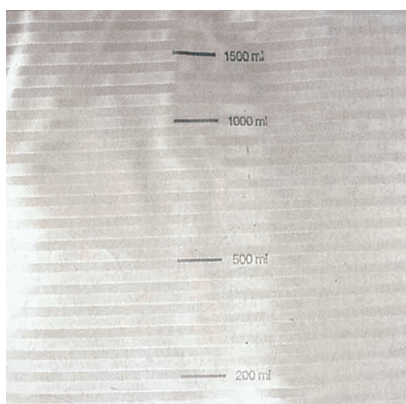

Indicação do volume




Marcas de graduação na parte da frente do saco facilitam a leitura do volume de urina, quando necessário.

Pode ser usado na perna

Haverá, eventualmente, alturas em que um doente ambulatorio precise de um saco de maior capacidade (por exemplo: durante viagens de avião de longo curso). A parte posterior suave do saco impede o contacto da pele com o plástico permitindo que a pele respire, evitando desconforto quando o saco é usado sobre a perna. Existem correias para os sacos de perna e as ranhuras pré-cortadas no seu topo e parte inferior, permitem uma fácil fixação.



Gama de Produtos

	Nº	Produto	Unid. por caixa*
	5062	Saco colector de urina de 1500 ml	10
	5063	Saco colector de urina de 1500 ml estéril	10
	5050	Correias para saco de perna	10
	5070	Suporte para sacos	10

* Unidades por encomenda: 100



Sistema Colector Conveen

O saco colector de urina **Conveen** de 1500 ml, juntamente com dispositivos urinários (*Penrose*) de uma e duas peças e dois tipos diferentes de sacos de perna formam uma gama completa para incontinência masculina.



Coloplast A/S
Rua Gorgel do Amaral nº 4 - cv Dta.
1250-119 Lisboa
Telef.: +351 21 38 38 626
Fax: +351 21 38 38 628
www.export.coloplast.com

Importador e Distribuidor:

MUNDINTER Intercâmbio Mundial de Comércio, S.A.
(Consultas e Concursos)
Av. António Augusto Aguiar 138
1069-132 Lisboa
Telef.: 213 81 99 00 (15 Linhas)
Fax.: 213 87 35 70
Lojas: Lisboa - Telef.: 213 81 99 80
Porto - Telef.: 225 50 48 62/3
Coimbra - Telef.: 239 82 82 56
www.mundinter.pt