



Ostomia

Catálogo de produtos



Coloplast Portugal, quem somos?

A Coloplast existe há mais de 60 anos. A nossa empresa reflete a paixão, ambição e empenho das pessoas que a tornaram realidade. Por estar determinada em tirar a irmã do isolamento, Elise Sørensen, enfermeira, inventou o primeiro saco de ostomia autoadesivo e descartável. Aage Louis-Hansen e a sua esposa Johanne aliaram a sua capacidade de engenharia ao empreendedorismo e, com forte empenho e resiliência, fundaram a Coloplast em 1957.

A empresa evoluiu e hoje seguimo-nos pelos seguintes princípios:

A nossa missão

Facilitar a vida às pessoas com necessidades de saúde íntima.

Os nossos valores

Proximidade... para melhor compreensão

Paixão... para fazer a diferença

Respeito e responsabilidade... para nos guiar

A nossa visão

Focar-nos em ouvir e responder às necessidades.

Ostomia Catálogo de produtos

Índice

SenSura®	2
SenSura 1 peça	4
SenSura®Click	5
SenSura Click Sacos	5
SenSura Click Placas	8
SenSura®Flex	10
SenSura Flex Sacos	12
SenSura Flex Placas	14
Coloplast®Kids	16
Alterna®	18
Alterna 1 peça	20
Alterna Sacos	22
Alterna Placas	24
Alterna Sistema de Irrigação	25
Conveen® Sacos de urina	28
Pós Operatório e Drenagem	30
Brava®	32
Conveen® Acessórios	36



Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

Sacos com filtro eficiente

Sistema de abertura discreto "Hide-away®"

Minimiza as fugas e melhora as condições da pele peristoma



Filtro eficiente

- Neutraliza o odor.
- Reduz incidentes de enchimento de ar no saco.
- Em sacos abertos e fechados.

Sistema de abertura discreto "Hide-away®"

- Abertura integrada em sacos abertos - fácil de esvaziar e limpar.
- Dobras seguras.
- Abertura macia para maior discrição.

Sacos multicanais para Urostomia

- Desenhado de forma a garantir um aspeto plano e reduzir o ruído de salpicos.
- Abertura macia para discrição e conforto.

Sistema de 2 peças com dois tipos de fixação

- Sistema de 2 peças com "Click"
 - Um clique audível confirma a fixação segura do saco na placa adesiva.
 - Permite que o saco seja rodado para a posição preferida.
- Sistema de 2 peças com "Flex" com fixação adesiva
 - Fixação confortável e discreta.
 - Não restringe o movimento.
 - Fácil conexão entre o saco e a placa, sem ter de pressionar o abdómen.

Adesivo exclusivo de proteção dupla

- O adesivo exclusivo de dupla camada SenSura protege a pele peristoma durante todo o tempo de utilização.



Placas com adesivo exclusivo de proteção dupla com fixação mecânica "Click" ou com fixação adesiva "Flex"

Camada de proteção

- Adesivo resistente à erosão, que protege contra os efluentes do estoma.
- Cria uma adesão firme entre o adesivo e o estoma.

Camada cuidadora da pele

- Absorve o excesso de humidade para manter a pele peristoma saudável.
- Garante adesão consistente.
- Juntas, as duas camadas do adesivo de proteção oferecem segurança e proteção da pele.



Duas versões de adesivo

As placas SenSura estão disponíveis em duas versões:

- SenSura® - a primeira escolha para as pessoas que têm uma Colostomia, Ileostomia ou Urostomia. A composição do adesivo confere uma aderência rápida, segura e facilita a sua remoção.
- SenSura® Xpro - para pessoas que necessitam de uma proteção extra contra os efluentes agressivos. As placas SenSura Xpro são mais resistentes à erosão do que as placas SenSura. A composição do adesivo confere uma aderência rápida e segura que permanecerá intacta quando exposta aos efluentes agressivos. Também protege a pele dos efluentes.

Placas Convex Light

- Para cuidar de estomas complexos: estoma retraídos, estomas em dobras cutâneas ou estomas ao nível da pele.
- A forma especial oval cria uma leve e delicada pressão na pele peristoma, tornando o estoma saliente.



Colostomia - Sacos fechados

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Volume
15420	6185637	Mini	Opaco	10-66 mm	140 ml
15450	6185645	Midi	Opaco	10-66 mm	300 ml
15480	6185660	Maxi	Opaco	10-76 mm	460 ml
15470	6185652	Maxi	Transparente	10-76 mm	460 ml
15020*	6399691	Midi	Opaco	10-66 mm	300 ml
15030*	6399709	Maxi	Opaco	10-76 mm	460 ml

* **NOVO:** Saco com janela de inspeção

Ileostomia - Sacos abertos

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Volume
15520	6029090	Mini	Opaco	10-66 mm	230 ml
15550	6185686	Midi	Opaco	10-66 mm	360 ml
15580	6185702	Maxi	Opaco	10-76 mm	490 ml
15570	6185694	Maxi	Transparente	10-76 mm	490 ml
15251*	6399717	Midi	Opaco	10-66 mm	360 ml
15281*	6399725	Maxi	Opaco	10-76 mm	490 ml

* **NOVO:** Saco com janela de inspeção

Urostomia - Sacos abertos de multicanais

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte	Volume
11802	6007690	Maxi	Opaco	10-76 mm	360 ml
11804	6007708	Maxi	Transparente	10-76 mm	360 ml



Colostomia - Sacos fechados

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Dimensão aro	Volume
10152	6185306	Mini	Opaco	50 mm	130 ml
10154	6185314	Midi	Opaco	40 mm	310 ml
10155	6185322	Midi	Opaco	50mm	290 ml
10156	6185330	Midi	Opaco	60mm	280 ml
10164	6185348	Maxi	Opaco	40mm	520 ml
10165	6185355	Maxi	Opaco	50mm	500 ml
10166	6185363	Maxi	Opaco	60mm	480 ml
10167	6185371	Maxi	Opaco	70mm	450 ml
10184	6185389	Maxi	Transparente	40mm	520 ml
10185	6185397	Maxi	Transparente	50mm	500 ml
10186	6185405	Maxi	Transparente	60mm	480 ml
10187	6398479	Maxi	Transparente	70mm	450 ml



Ileostomia - Sacos abertos

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Dimensão aro	Volume
10351	6185413	Mini	Opaco	40 mm	250 ml
10352	6185421	Mini	Opaco	50 mm	250 ml
10354	6185439	Midi	Opaco	40mm	410 ml
10355	6185447	Midi	Opaco	50mm	390 ml
10356	6185454	Midi	Opaco	60mm	600 ml
10364	6185462	Maxi	Opaco	40mm	600 ml
10365	6185470	Maxi	Opaco	50mm	580 ml
10366	6185488	Maxi	Opaco	60mm	520 ml
10367	6185496	Maxi	Opaco	70mm	600 ml
10384	6185504	Maxi	Transparente	40mm	600 ml
10385	6185512	Maxi	Transparente	50mm	580 ml
10386	6185520	Maxi	Transparente	60mm	520 ml
10387	6398487	Maxi	Transparente	70mm	510 ml

2 Peças - Sacos

Requer a utilização das placas SenSura Click



Ileostomia - Sacos abertos de Alto Débito

Ref. ^a	CNP	Volume	Cor	Aro
19041	7133579	1120 ml	Opaco	50 mm
19042	7133561	1080 ml	Opaco	60 mm



Urostomia - Sacos abertos de multicanais

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Dimensão aro	Volume
11851	6007666	Midi	Transparente	40 mm	370 ml
11852	6007682	Midi	Transparente	50 mm	360 ml
11854	6007633	Maxi	Transparente	40mm	490 ml
11855	6007641	Maxi	Transparente	50mm	430 ml
11856	6007658	Maxi	Transparente	60mm	410 ml



Placas Lisas

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
10011	6185256	40 mm	10-35 mm
10021	6185264	50 mm	10-45 mm
10031	6185272	60 mm	10-55 mm
10041	6185280	70 mm	10-65 mm



Placas Convex Light

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
11011	6185538	40 mm	15-23 mm
11021	6185546	50 mm	15-33 mm
11031	6185553	60 mm	15-43 mm
11041	6185561	70 mm	15-53 mm



Placas Xpro Lisas

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
10015	6007401	40 mm	10-35 mm
10025	6007393	50 mm	10-45 mm
10035	6007419	60 mm	10-55 mm



Placas Xpro Convex Light

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
11015	6007435	40 mm	15-23 mm
11025	6007450	50 mm	15-33 mm
11035	6007468	60 mm	15-43 mm

Segurança e flexibilidade

O SenSura Flex, duas peças com fixação adesiva, é uma combinação única de segurança e flexibilidade. Tem a flexibilidade dos dispositivos de uma peça, e as vantagens dos dispositivos de duas.



Liberdade de movimentos sem restrições

- O ajuste flexível e suave combinado com uma flange, ajusta-se aos contornos individuais do corpo, enquanto assegura uma posição estável do saco.
- Na verdade, **69%** reportaram que a flexibilidade do sistema de fixação é muito bom ou bom¹.

Conveniente e discreto


- Um sistema de fixação adesiva liso e discreto sem peças rijas, fácil de manusear.
- De facto, **71%** reportou que o manuseamento do sistema de fixação é muito bom ou bom¹.

1. Arnaud, J et al. (2008) "A randomized crossover study of a new two-piece adhesively coupled ostomy pouching system". Presented at the World Council of Enterostomal Therapists (WCET Congress in Ljubljana, Slovenia, June 15-19, 2008).

Uma gama completa para satisfazer as necessidades das pessoas com ostomia

Filtro eficiente
Neutraliza o odor, previne fugas e o enchimento do saco de ar.

Multicanais
Aspetto plano, reduz o ruído de salpicos, válvula anti-refluxo.

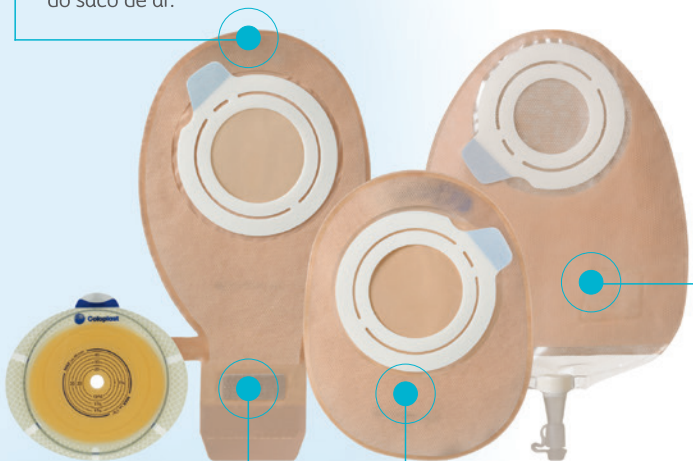

Sistema de abertura "Hide-away"
Fáceis de esvaziar e limpar, dobras seguras e maior discrição.

Tecido não tecido
Mais conforto: não rasga e é repelente à água.




Colostomia - Sacos fechados

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de encaixe	Volume
10904	7017038	Midi	Opaco	35 mm	310 ml
10914	7017079	Maxi	Opaco	35 mm	520 ml
10895	7017020	Mini	Opaco	50 mm	100 ml
10905	7017046	Midi	Opaco	50 mm	240 ml
10915	7017087	Maxi	Opaco	50 mm	460 ml
10918	7017103	Maxi	Opaco	70 mm	340 ml
10911	7017053	Maxi	Transparente	35 mm	520 ml
10912	7017061	Maxi	Transparente	50 mm	460 ml
10917	7017095	Maxi	Transparente	70 mm	340 ml

2 Peças - Sacos

Requer a utilização das placas SenSura Flex

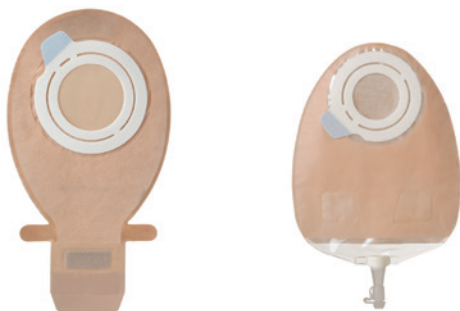

Ileostomia - Sacos abertos

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de encaixe	Volume
10314	7017111	Midi	Opaco	35 mm	330 ml
10315	7017129	Midi	Opaco	50 mm	250 ml
10324	7017152	Maxi	Opaco	35 mm	550 ml
10325	7017160	Maxi	Opaco	50 mm	490 ml
10328	7017186	Maxi	Opaco	70 mm	340 ml
10321	7017137	Maxi	Transparente	35 mm	550 ml
10322	7017145	Maxi	Transparente	50 mm	490 ml
10327	7017178	Maxi	Transparente	70 mm	340 ml
10390	7017194	XXL	Transparente	90 mm	500 ml

Urostomia - Sacos abertos de multicanais

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de encaixe	Volume
11824	7017202	Maxi	Opaco	35 mm	440 ml
11825	7017210	Maxi	Opaco	50 mm	380 ml
11827	7017228	Maxi	Transparente	35 mm	440 ml
11828	7017236	Maxi	Transparente	50 mm	380 ml




Placas Lisas

Ref. ^a	CNP	Área de recorte	Área de encaixe
10101	7016956	10-33 mm	35 mm
10102	7016964	10-48 mm	50 mm
10103	7016972	10-68 mm	70 mm
10108	7016980	10-88 mm	90 mm



Placas Convex Light

Ref. ^a	CNP	Área de recorte	Área de encaixe
11301	7016899	15-23 mm	35 mm
11303	7016907	15-43 mm	50 mm
11307	7016915	15-56 mm	70 mm

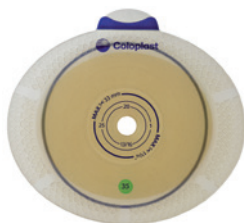

Placas Xpro Lisas

Ref. ^a	CNP	Área de recorte	Área de encaixe
10104	7016923	10-33 mm	35 mm
10105	7016931	10-48 mm	50 mm
10106	7016949	10-68 mm	70 mm



Placas Xpro Convex Light

Ref. ^a	CNP	Área de recorte	Área de encaixe
11304	7016998	15-23 mm	35 mm
11306	7017004	15-43 mm	50 mm
11308	7017012	15-56 mm	70 mm

Coloplast® Kids

A solução especialmente concebida para crianças. Como o Coloplast Kids dá às crianças entre os 6 meses e os 4 anos a liberdade para se movimentarem como querem:



1. Adesivo elástico em forma de estrela

O adesivo é suave para a pele e em forma de estrela, com pétalas especialmente desenhadas para abraçar as barrigas pequenas e redondas das crianças, enquanto permite maior flexibilidade relativamente à sua colocação.

2. Zonas de adaptação

Os rebordos do dispositivo apresentam zonas de adaptação especiais que aumentam a flexibilidade à volta do estoma para uma amplitude de movimento otimizada.

3. Tecido repelente à água

O Coloplast Kids apresenta-se com um tecido de cor neutra para uma aparência discreta não associável a dispositivos médicos.

4. Filtro em círculo único

Esta característica especialmente desenvolvida está provada que adia o entupimento e reduz os incidentes de enchimento de ar em 61%².

2. Coloplast, Clinical Study, 2010, 61% for ileostomists, 53% for colostomists.

Para que as crianças possam ser crianças



1 Peça

Ref. ^a	CNP	Tipo de saco	Tamanho	Cor	Área de recorte
18710	7017533	Ileostomia	Midi	Opaco	0-35 mm
18711	7017541	Ileostomia	Midi	Transparente	0-35 mm
18712	7017558	Urostomia	Midi	Transparente	10-35 mm
18713	7017566	Urostomia	Midi	Opaco	10-35 mm

2 Peças

Ref. ^a	CNP	Tipo de saco	Tamanho	Cor	Área de encaixe
18720	7017574	Ileostomia	Mini	Opaco	27 mm
18721	7017582	Ileostomia	Mini	Transparente	27 mm
18722	7017590	Ileostomia	Midi	Opaco	27 mm
18723	7017608	Ileostomia	Midi	Transparente	27 mm
18724	7017616	Ileostomia	Midi	Opaco	35 mm
18725	7017624	Ileostomia	Midi	Transparente	35 mm
18730	7017632	Urostomia	Midi	Opaco	27 mm
18731	7017640	Urostomia	Midi	Opaco	35 mm

Placas



Ref. ^a	CNP	Área de recorte	Área de encaixe
18735	7017657	0-27 mm	27 mm
18747	7017665	0-35 mm	35 mm

Adesivo com estrutura em espiral

O dispositivo Alterna consiste em dois adesivos diferentes, dispostos em camadas e enrolados numa estrutura espiral única, unindo dois materiais: uma das camadas fornece força adesiva e a outra absorvente, protegendo a pele da irritação e facilitando a remoção.

Seguro e fácil de fixar

O sistema de duas peças Alterna oferece uma fixação mecânica segura. Um "clique" sinaliza que a bolsa está corretamente encaixada na placa, sem aplicar pressão no abdômen. O anel de fixação pode ser girado para a posição mais conveniente para a fixação.

Filtro eficiente

Os sacos fechados apresentam um filtro multicamadas. O filtro é coberto por uma membrana semipermeável que permite a passagem do ar, mas não da humidade, minimizando o efeito balão. A membrana em si é coberta por uma rede que permite a passagem de ar e humidade, mas não de fezes. Essas duas barreiras ao redor do componente do filtro ativo fornecem proteção dupla.

Válvula anti-refluxo

A válvula anti-refluxo dos sacos de Urostomia evita de forma efetiva que a urina volte para a abertura do estoma, reduzindo assim o risco de infecção urinária e problemas cutâneos.



Placa Alternativa

É uma placa lisa para pessoas que vivem com Colostomia, Ileostomia e Urostomia, e que necessitam de uma adesividade standard.

Placa Extra Alternativa

Esta placa é para pessoas que necessitam de uma proteção extra contra os efluentes agressivos. É mais resistente à erosão do que a standard. O adesivo é transparente. Durante a sua utilização a barreira do adesivo expande, do centro para fora, devido à assimilação da humidade. A área expandida tornar-se-á branca. Isto facilita a monitorização de quanto a placa se expandiu a dado momento ou quando chegou o momento de trocar a placa.





Colostomia - Sacos fechados

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte
5776	7921833	Midi	Opaco	20-55 mm
5786	7921866	Maxi	Opaco	20-55 mm
5787	7921874	Maxi	Opaco	10-70 mm
5686	7921841	Maxi	Transparente	20-55 mm
5687	7921858	Maxi	Transparente	10-70 mm
6326	7016121	Maxi	Transparente	20-75 mm
5790	7921973	Maxi	Opaco	Pré-rec. a 30 mm
5792	7921999	Maxi	Opaco	Pré-rec. a 40 mm



Ileostomia - Sacos abertos

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte
5875	7922013	Midi	Opaco	10-55 mm
5885	7922039	Maxi	Opaco	10-70 mm
13840*	6007575	Midi	Opaco	12-65 mm
13870*	6007476	Maxi	Opaco	12-75 mm
13860*	6007526	Maxi	Transparente	12-75 mm

Urostomia - Sacos abertos de multicanais

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Área de recorte
5575	7922054	Midi	Transparente	10-55 mm
5585	7922062	Maxi	Transparente	10-55 mm
5580	7016139	Maxi	Opaco	10-55 mm

* Geração Alterna Free



Colostomia - Sacos fechados

Ref. ^a	CNP	Tamanho	Cor	Dimensão aro
1671	7921510	Midi	Opaco	40 mm
1672	7921528	Midi	Opaco	50 mm
1673	7921536	Midi	Opaco	60 mm
1681	7921577	Maxi	Opaco	40 mm
1682	7921585	Maxi	Opaco	50 mm
1683	7921593	Maxi	Opaco	60 mm
1687	7921619	Maxi	Transparente	50 mm
1688	7921627	Maxi	Transparente	60 mm
46448*	7016147	Maxi	Opaco	40 mm
46458*	7016154	Maxi	Opaco	50 mm
46468*	7016170	Maxi	Opaco	60 mm
46467*	7016162	Maxi	Transparente	60 mm

* Geração Alterna Free

Requer a utilização das placas Alterna ou SenSura Click



Ileostomia - Sacos abertos

Ref.ª	CNP	Tamanho	Cor	Dimensão aro
13954*	7015412	Midi	Opaco	40 mm
13955*	7015420	Midi	Opaco	50 mm
13956*	7015438	Midi	Opaco	60 mm
13986*	6007518	Maxi	Opaco	60 mm
1692	7015446	Maxi	Opaco	50 mm
1693	7015453	Maxi	Opaco	60 mm
1781	7015537	Pediátrico	Opaco	40 mm

Urostomia - Sacos abertos de multicanais

Ref.ª	CNP	Tamanho	Cor	Dimensão aro
1751	7921759	Midi	Transparente	40 mm
1752	7921767	Midi	Transparente	50 mm
1757	7921775	Maxi	Transparente	40 mm
1758	7921783	Maxi	Transparente	50 mm
1759	7921791	Maxi	Transparente	60 mm
1754	6007773	Maxi	Opaco	40 mm
1755	6007807	Maxi	Opaco	50 mm
1756	6007815	Maxi	Opaco	60 mm

* Geração Alterna Free



Placas Lisas

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
1771	7921445	40 mm	10-35 mm
1776	7921452	50 mm	10-45 mm
1779	7921460	60 mm	10-55 mm



Placas Extra

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
2831	7959015	40 mm	10-35 mm
2832	7959023	50 mm	10-45 mm
2833	7959031	60 mm	10-55 mm



Placas Deep Convex

Ref. ^a	CNP	Tamanho do aro	Área de recorte
46759	7921478	50 mm	15-33 mm
46769	7921486	60 mm	15-43 mm

Alterna® Sistema de irrigação



Sistema de Irrigação Alterna

A irrigação é um procedimento que permite às pessoas que fizeram uma colostomia sigmóide recuperar o controlo dos movimentos intestinais e aumentar a sensação de liberdade e autoconfiança.

Fácil utilização

O sistema é fácil de usar, completamente seguro e confortável. O tempo total para realizar a irrigação é aproximadamente de 30 minutos.

Kit completo

O sistema de irrigação Alterna é constituído com os componentes necessários para efetuar uma irrigação de forma segura.

O kit ajusta-se aos dispositivos Alterna de uma ou duas peças. Vem acondicionado num "nécessaire" e inclui: 1 saco de água, 1 cone, 2 mangas de irrigação, 1 placa de pressão e 1 cinto (para utilizadores de dispositivos de uma peça). Os utilizadores de duas peças aplicam a manga diretamente na placa.

Termómetro integrado

A bolsa da água tem um termómetro integrado. O mostrador luminoso indicará a temperatura da água. Se indicar vermelho, a água está muito quente, se indicar azul a água está muito fria. Se indicar verde a temperatura está correta.
i.e. 36-38° C.

Roda de pás/regulador

A roda de pás é integrada no regulador e permite visualizar se a água está a entrar para o cólon. O fluxo de água pode ser regulado através do ajuste da velocidade do regulador.

O que utilizar entre irrigações

Depois de ter realizado a irrigação é recomendada a utilização de Alterna Minicap ou Alterna Conseal Obturador.

Antes de realizar uma irrigação deve sempre consultar um médico ou enfermeiro.



Alterna® Minicap 1 peça

Pequeno e discreto. Ideal para quem tem uma colostomia e faz irrigação. O seu tamanho reduzido é ideal para momentos íntimos.

Conseal - obturador

É um obturador com adesivo em espiral, muito fino e discreto. Pode ser utilizado diária ou ocasionalmente, de acordo com as necessidades individuais. O obturador pode ser usado por pessoas com colostomia sigmóide e pode ser utilizado com ou sem irrigação. É inserido no estoma e bloqueia a saída de fezes de forma eficaz, mas permite a passagem da flatulência pelo filtro de eliminação de odores.

Quando colocado no estoma a película solúvel é dissolvida imediatamente e desta forma permite que a área de esponja suave se expanda retendo as fezes. Tanto o filtro como o obturador têm um período máximo de utilização recomendada entre as 8-12 horas.



Irrigação

Produto	Ref. ^a	CNP	Tamanho
Kit Irrigação	12830	7921387	Universal
Saco de Água	1511	7921395	-
Cânula	1110	7921437	-
Manga	12836	7921429	Diâmetro 60 mm
Cinto	421	7921163	-
Placa de Pressão*	12820	6185629	-
Minicap	5876	7921379	Recortável 20-55 mm
Obturador 35 mm	1435	7921288	Ostomia 25-35 mm
Obturador 45 mm	1445	7921296	Ostomia 25-35 mm
Obturador 35 mm	1485	7921304	Ostomia 35-45 mm
Obturador 45 mm	1495	7921312	Ostomia 35-45 mm

* Produto sem participação

Conveen® Sacos coletores de urina

Os sacos coletores de urina da Coloplast são produzidos com alta tecnologia e padrão de elevada qualidade para evitar fugas ou odores, aumentando o conforto dos utilizadores

Maior discrição

A urina é distribuída de igual forma na bolsa, evitando assim que o seu peso cause incómodo ou ruídos ao movimentar-se, garantindo uma maior discrição ao utilizador.

Maior segurança e conforto

Todos os sacos possuem uma válvula de drenagem de fácil manuseamento e uma válvula anti-refluxo, que garantem total segurança, higiene e funcionalidade. Na parte posterior o saco possui um tecido suave e antialérgico que fica em contacto com a pele, permitindo a sua respiração, oferecendo maior conforto.



Ref.	CNP	Volume	Extensão tubo
21346*	6399055	2000 ml	140 cm
5062	7922542	1500 ml	90 cm
5167	7922534	750 ml	50 cm
5161	7922476	500 ml	50 cm
5165	7922518	350 ml	50 cm
5050**	7922120	Fitas Perna	Ajuste

* Comercializado a partir de outubro 2021

** Produto sem participação

Pós-Operatório e Drenagem

Sistema 1 peça seguro e protetor da pele

Com e sem janela removível.
Válvula de saída larga
70mm e 100mm

Janela Removível

Os sacos Pós-Operatório criados para os primeiros momentos do período pós-operatório estão disponíveis em duas versões: um com janela removível e outro sem. A janela removível oferece a possibilidade de observar e tratar a ostomia sem ter de retirar o dispositivo. O abrir e fechar da janela é feito de forma fácil e sem aplicar pressão na barriga, o que o torna indolor para o utilizador.



Válvula de saída larga

O saco tem uma válvula larga, macia e fácil de usar o que torna fácil e higiénico o esvaziamento do saco. Se necessário, a saída pode ser ligada a um saco de drenagem. Se a válvula de saída já não for necessária pode ser cortada e o saco pode ser fechado usando o clipe adesivo quem vem com o saco.

Uso de luvas

O saco Pós-Operatório pode ser aplicado com utilização de luvas. Quando se retira o papel protetor fica uma pequena parte transparente de apoio enquanto se aplica o dispositivo na pele. Desta forma é possível aplicar o saco sem o adesivo ficar colado às luvas.



Pós-Operatório



Pós-Operatório SenSura

Ref. ^a	CNP	Detalhe	Área de recorte
19010*	6334110	Estétil	10-70 mm
19011*	6334128	Estétil	10-100 mm



Pós-Operatório Alterna

Ref. ^a	CNP	Detalhe	Área de recorte
12808*	6335083	Estétil	10-70 mm
12810*	6334144	Estétil	10-100 mm
12800*	6334136	Não Estétil	10-70 mm
12802*	6007609	Não Estétil	10-100 mm

* Produto sem participação

Drenagem



O saco de drenagem Coloplast com o seu adesivo flexível garante a segurança máxima durante a drenagem. Tem uma válvula, macia e fácil de usar, que torna fácil e higiénico o esvaziamento do saco. Em caso de uma grande e forte drenagem, pode ser ligado um saco de noite ao saco de drenagem sem necessidade de usar um coletor adicional.

A válvula anti-refluxo impede que os fluídos drenados retornem e assim evitando que o fluido entre em contacto com a pele ou com a ferida.

Drenagem

Ref. ³	CNP	Detalhe	Capacidade
2210*	6185116	Estéril	100 ml
2215*	6185124	Estéril	300 ml
2220*	6185132	Estéril	500 ml

* Produto sem comparticipação

Uma ajuda na redução de fugas, no cuidado da pele peristoma e controlo do odor

Formas diferentes do corpo e necessidades diferentes, às vezes requerem soluções individuais para evitar fugas, manter a pele peristoma saudável e proteger contra odores desagradáveis. Os acessórios Brava foram desenvolvidos para ir ao encontro destas necessidades.



Pasta em Tiras Brava

A Pasta em Tiras Brava é utilizada para preencher pregas e cicatrizes da pele peristoma. Melhora a aderência do dispositivo. É facilmente moldável em torno do estoma, selando-o e prevenindo fugas que causam problemas na pele.

Ref. ^a	CNP	Embalagem
2655	7921320	10 unid.



Anel Moldável Brava

Selagem longa e duradoura perfeitamente ajustada ao estoma. O Anel Moldável Brava apresenta uma formulação reforçada que garante uma proteção prolongada contra as fugas. É fácil de manusear, tornando simples assegurar uma selagem perfeitamente ajustada.

Ref. ³	CNP	Embalagem
12042	6007716	30 unid.



Tiras de Fixação Brava

Adapta-se às diferentes formas do corpo. As tiras de fixação Brava mantêm a placa na posição sendo uma segurança de fixação extra. A sua elasticidade permite acompanhar as formas do corpo e os seus movimentos. São também suaves na pele e absorvem a humidade.

Ref. ³	CNP	Embalagem
12070	6007724	20 unid.



Creme Barreira em Spray

Não irritante e não acumula camadas. O Creme Barreira em spray não é irritante e pode reduzir os problemas da pele resultantes dos efluentes do estoma e adesivos porque confere uma barreira protetora. Também não afeta a aderência de um novo dispositivo, nem acumula camadas na pele.

Ref. ³	CNP	Embalagem
12020	6007740	50 ml



Removedor de adesivo

Suave e não irritante. O removedor de adesivo Brava® limpa e remove o dispositivo de ostomia e os resíduos facilmente. O mais importante é que não é irritante, seca em poucos segundos e não afeta a adesividade de uma próxima aplicação.

Ref. ³	CNP	Embalagem
12010	6007732	50 ml



Pó Brava®

Absorve a humidade. O Pó Brava foi desenvolvido para absorver a humidade da pele peristoma. Mantém a pele seca e reduz a irritação da pele, mantendo a pele peristoma saudável.

Ref. ^a	CNP	Embalagem
1907	6007757	25 g

Promove
sensação de
segurança



Cinto Brava

Segurança extra. A combinação do cinto e um dispositivo de ostomia garantem ao utilizador uma segurança extra e um tempo de uso maior. O cinto Brava é suave, confortável e discreto.

Ref. ^a	CNP	Embalagem
421	7921163	1 unid.

Proteção da pele peristoma

Os produtos de proteção da pele Conveen previnem e aliviam os problemas da pele peristoma: limpam, humidificam, protegem e preservam a pele.



Película de Proteção Cutânea em Toalhetes

Protege a pele de trauma devido ao adesivo, fricção e irritação química das fezes e urina. Criam uma película de proteção quando aplicados na pele.

Ref. ^a	CNP	Embalagem
62042	7922179	Toalhetes



Número de apoio:
800 914 390
(chamada gratuita)
www.coloplast.pt